

Umsetzung des Erlasses (MSW vom 15.03.2021) zur Selbsttestung an der Fritz-Bauer-Gesamtschule

1. Die Selbsttests werden von allen Unterrichtenden am 22. Und 23.3.2021 jeweils in der ersten Stunde mit der anwesenden Schülergruppe durchgeführt. Alle Schüler*innen der EF, Q1 und Q2 - aufgeteilt nach entsprechenden Gruppen - kommen zur ersten Stunde in die Schule und führen die Tests unter Aufsicht ihrer Beratungslehrer*innen durch.
 - a. Q2 Gruppe 1: A - Kro
 - b. Q2 Gruppe 2: Ku – Z

Der Unterricht für die Klassen 7a, 7c und 8b beginnt für die an dem Tag anwesende Schülergruppe ebenfalls in der 1. Stunde. Die 7a wird von DRES, die 7c wird von WERP, die 8b wird von BAAA betreut.

2. Alle Klassen machen die Tests in ihren Klassenräumen, die EF in B 2.01 und B2.03, die Q1 in B 2.08 2.05 und die Q2 in C 0.02 und 0.03.
3. Die Testkits für die Schülergruppen, Sanitaschen und ggf. weitere Hygieneartikel für Lehrer*innen werden in den Gebäuden B & C von den Hausmeistern und im Gebäude A von den Sekretärinnen ab 7.30 Uhr verteilt. Die Hausmeister stellen auch die Mülleimer mit den speziellen Mülltüten zur Entsorgung zentral außen vor den Gebäuden A, B und C auf.
4. Die Vorgaben zur Hygiene und Dauer-Lüftung sind einzuhalten. Die Schüler*innen waschen sich vor und nach der Testung die Hände. Sollten die Schüler*innen im Raum ohne Maske während des Tests nicht 1,5m Abstand zueinander einhalten können, muss die Gruppe geteilt werden.
5. Hilfestellungen bei der Test-Durchführung sind nur verbal zu erteilen.
6. Die Testung wird nach der Beschreibung auf den Tests durchgeführt:
 - a. kein Strich= ungültig und muss wiederholt werden
 - b. 1 Strich= negativ
 - c. 2 Striche=positiv.
7. Die Test-Kits werden von den Schüler*innen in den Mülltüten in den Räumen entsorgt und dann zu den zentral aufgestellten Mülleimern gebracht.
8. Die Lehrkraft der ersten Stunde verbleibt auch in der zweiten Stunde in dieser Lerngruppe. Avisierte Klausuren und Klassenarbeiten müssen ggf. in die dritte Stunde verschoben werden.
9. Positiv getestete Schüler*innen und deren unmittelbare „Nachbarn“ müssen betreut und isoliert werden (außerhalb des Gebäudes A vor der langen Glasfront). Die Schulleitung ist zunächst mündlich und dann schriftlich zu benachrichtigen und kontaktiert die Eltern der isolierten Schüler*innen, die dann wiederum den Arzt benachrichtigen müssen. Danach folgen allgemeine Quarantäneregeln (Gesundheitsamt und Hausarzt...)

10. Grundsätzlich ist die Testung freiwillig. Eltern oder die volljährigen Schüler*innen können aber der Testung mittels eines Formulars widersprechen. Dieses Formular ist bis Freitag bei den Klassen- oder Beratungslehrer*innen abzugeben.
11. Nach der Testung wird die beigelegte Dokumentation ausgefüllt und der Abteilungsleitung abgegeben, die wiederum diese vollständig erfasst bei der Schulleitung hinterlegt.

Diese Information wird an Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen verteilt. Rückfragen werden zunächst von den Klassen- und Beratungslehrer*innen gesammelt und je nach Zuständigkeit durch den Lehrer*innenrat, das Sicherheitsteam oder die Schulleitung beantwortet.

Anhang:

Kurzanleitung Testdurchführung

Widerspruchserklärung

Dokumentation der Testergebnisse

Formulare und Hinweise siehe: <https://www.schulministerium.nrw/selbsttests>

Stephani Overhage und Patrick Werneburg

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kurzanleitung für Patienten

Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Verwendung des **SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test**. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Tests unbedingt die Gebrauchsanweisung für Patienten.

Haben Sie Fragen?
Etwas schnelle Antwort auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter www.miraclean.com.
Oder rufen Sie unser KundenService-Center an unter der Rufnummer 08002282420 (Montag bis Freitag von 08:00 – 18:00 Uhr).

1 Test vorbereiten

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für den Patienten für den **SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test** genau durch.




2 Nasenabstrichprobe entnehmen und vorbereiten

1. Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie den Test durchführen.
2. Nehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Verpackung. Achten Sie dabei darauf den Tupfer nur am Griff zu berühren, nicht am der Spitze mit dem „Wattbausch“.
3. Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten.
4. Führen Sie den Tupfer mit dem „Wattbausch“ vorsichtig in ein Nasenloch ein. Schieben Sie den Tupfer langsam ca. 2 cm vorwärts (parallel zum Gaumen – Richtung Rechts, nicht nach oben), bis Sie einen Widerstand spüren. Üben Sie dabei keinen Druck aus.



3 Test durchführen

1. Legen Sie den Teststreifen auf eine ebene Fläche.
2. Halten Sie das Röhrchen senkrecht über das runde markierte Feld (nicht das rechteckige Ergebnisfenster).

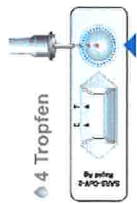

Wichtige Sicherheitsinformationen



- Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie den Test durchführen.
- Halten Sie den Tupfer sauber. Vermeiden Sie es, die Spitze des Tupfers zu berühren, und stellen Sie sicher, dass er vor der Verwendung keine Oberflächen berührt.
- Achten Sie darauf, dass Sie für die Probenentnahme die korrekten, beigelegten Abstrichtupfer des Herstellers "Miraclean Technology" verwenden (korrekt: P/N 93050; nicht zu verwenden: P/N 93000).

Komponenten des Testkits

Teststreifen



Verpackungsbeutel und Trockenmittel



Extraktionspuffer Röhrchen und Spenderkappe



Steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean, P/N 93050)


3. Öffnen Sie den Verpackungsbeutel an der Einreislinie und entnehmen Sie den Teststreifen sowie die Tüte mit Trockenmittel.

4. Vergewissern Sie sich, dass der Teststreifen unverändert ist und dass die Statusanzeige des Trockenmittels gelb ist (= zur Verwendung geeignet).



7. Stellen Sie den Abstrichtupfer in ein Röhrchen mit Extraktionspuffer. Drücken Sie das Röhrchen im unteren Bereich zusammen und drehen Sie den Tupfer mehr als 10-mal hin und her.

8. Drücken Sie die Seiten des Röhrchens weiterhin zusammen, während Sie den Tupfer entnehmen, um die gesamte Flüssigkeit aus dem Tupfer zu pressen.

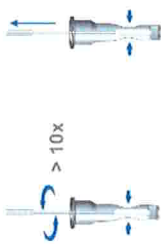


WARNUNG! Wenn das Röhrchen nicht zusammengedrückt wird, kann ein Überschuss von Puffer am Tupfer zu falschen Ergebnissen führen.

9. Verschließen Sie das Röhrchen fest mit der Spenderkappe. Fahren Sie mit **3 Test durchführen** fort.



4. Stellen Sie die Stoppuhr und lesen Sie das Testergebnis nach 15 bis 30 Minuten ab.

WARNUNG! Wenn das Testergebnis nach mehr als 30 Minuten abgelesen wird, kann das Ergebnis falsch sein.

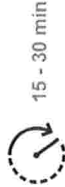

15 - 30 min

Widerspruchserklärung
gegen eine freiwillige Durchführung von COVID-19-Selbsttests an Schulen
im Schuljahr 2020/21

In den kommenden Wochen – auch nach den Osterferien - kann Ihr Kind freiwillig an COVID-19- Selbsttests in der Schule teilnehmen.

Sollten Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte nicht wünschen, dass Ihr Kind einen Selbsttest vornimmt, so können Sie dies mit der Abgabe dieses Formulars gegenüber der Schule erklären (Widerspruchserklärung).

Ihrem Kind wird in diesem Fall kein Selbsttest durch die Schule ausgehändigt; es nimmt nicht an den Testungen teil.

Bitte beachten Sie: Die Schule kann Ihre Erklärung nur berücksichtigen, wenn sie der Schule auch rechtzeitig vorliegt!

Sie können Ihre Widerrufserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft rückgängig machen. Sie können dies der Schule per Post oder E-Mail mitteilen oder Ihrem Kind eine entsprechende Erklärung mitgeben. Dafür, dass Ihre Erklärung die Schule auch rechtzeitig erreicht (Zugang), tragen Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte die Verantwortung.

Dieser Widerspruch betrifft nicht die Vornahme von Testungen, die durch das Gesundheitsamt aufgrund infektionsschutzrechtlicher Vorgaben angeordnet werden können. Darüber wird Sie das Gesundheitsamt informieren

Vor- / Nachname der Schülerin / des Schülers: _____

Anschrift: _____

Telefonnummer / E-Mail-Adresse (der / des Erziehungsberechtigten): _____

Ich widerspreche, dass mein unter 18-jähriges Kind in der Schule einen COVID-19-Selbsttest vornimmt.

Ort, Datum

Unterschrift einer eines Erziehungsberechtigten

Name (in Blockschrift)

Durchführung von Selbsttests - Dokumentation der Testergebnisse

(gemäß Schulmail vom 15. März 2021)

Schule (Schulstempel) _____

Klasse / Kurs:.....

Monat:.....

Datum	Anzahl der anwesenden Schülerinnen und Schüler	Selbsttests			positiv getestete Schülerinnen und Schüler		Namenskürzel der durchführenden Lehrkraft
		ausgegeben	darunter positiv	ungültig	Name	Name	

Bitte behandeln sie diese Angaben vertraulich